



# Chamber Protect

## The MELAG chamber cleaning set

**멸균기 챔버를 깨끗하게 유지하며, 오래도록 사용할 수 있는 안정적인 솔루션 :**

새롭게 출시 된, MELAG 챔버 클리닝 세트는 일주일에 한번 사용으로 챔버가 변색되거나 침전되는 것을 방지하고, 눈에 보이지 않는 오염물까지 쉽게 제거합니다.

**• MELAG 챔버 클리닝 세트의 장점 :**

- ✓ 보풀이 일지않는 뽑아쓰는 티슈 50장과 극세사천 1장으로 구성
- ✓ 챔버 및 도어씼에 손상을 주지 않습니다.
- ✓ 광범위한 재료 호환성 테스트를 통해 승인된 안전한 세척제
- ✓ MELAG 멸균기 외 모든 멸균기에 사용 가능합니다.



## You have the choice



정기적으로 사용하며 관리한 챔버 사진



관리하지 않은 챔버 사진

# 일주일에 한번 챔버 클리닝 세트를 사용하여, 챔버를 보호하고, 빛나는 광택을 유지하세요!



## 1 Chamber Protect를 뿌립니다.

멸균기의 전원을 끄고, 도어를 열어 챔버를 식히세요. Chamber Protect를 도어 안쪽에 2회, 챔버 내부에 15회 정도 뿌립니다.



## 3 챔버 내부의 표면을 닦습니다.

보풀이 일지않는 티슈에 탈염수(약 50ml)를 적신 후, Chamber Protect가 발라진 표면을 닦고, 탈염수가 스며들 때까지 약 5분간 기다립니다.



## 2 Chamber Protect를 바릅니다.

보풀이 일지않는 티슈로 챔버 내부의 표면(스테인리스 스틸)을 고르게 잘 문지르고, Chamber Protect가 스며들 때까지 약 3분간 기다립니다.



## 4 챔버 내부의 표면을 건조시킵니다.

파란색 극세사천으로 도어 안쪽과 챔버 내부를 고르게 잘 문질러 닦아 완전히 건조시킵니다.



**MELAG**  
competence in hygiene

㈜ 엠디세이프  
**MD+ safe**

02-334-2815