



MELAG 멸균기 표면 관리를 위한 Chamber Protect 사용 매뉴얼


사용 주기 : 주 1회

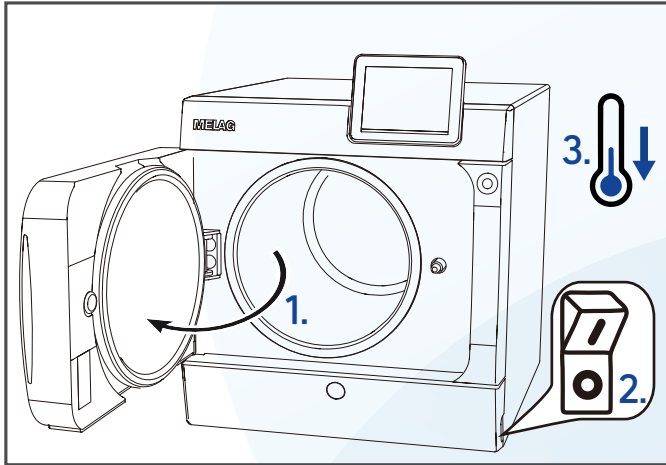


1. 전원을 끄고 챔버를 식힙니다.

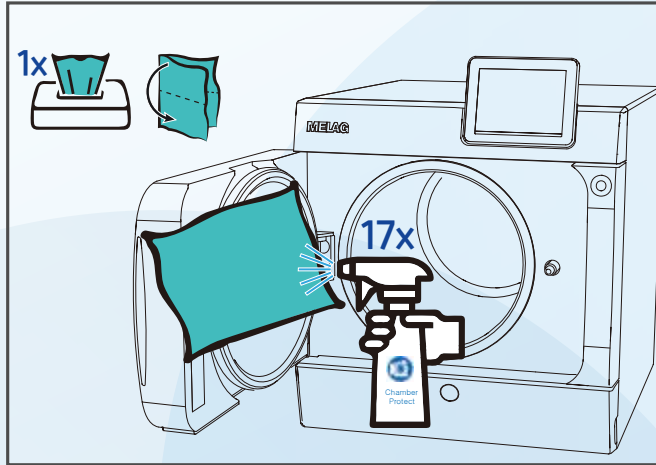


2. Chamber Protect를 종이타월에 충분히 분사합니다.
(Chamber Protect를 챔버에 직접 분사해도 됩니다)

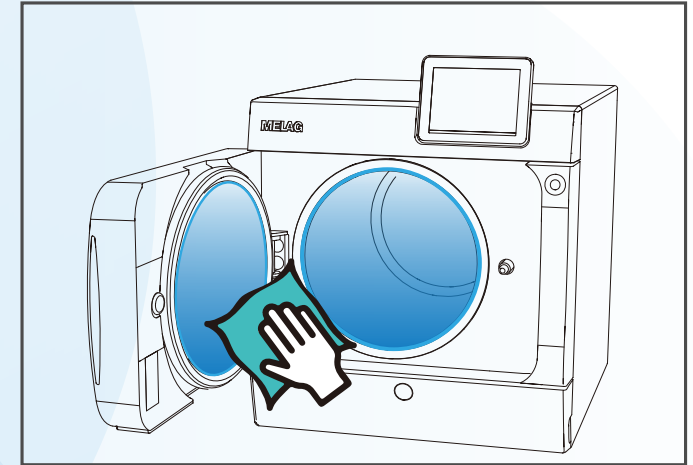


3. Chamber Protect를 분사한 종이타월로 챔버 표면의 얼룩을 닦습니다.

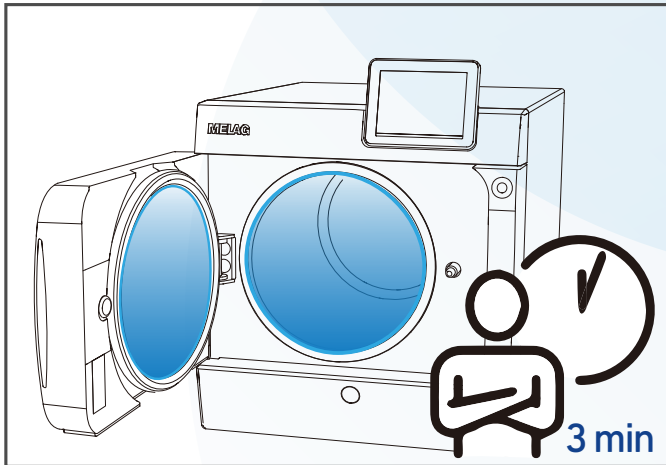

4. Chamber Protect가 건조 될 때까지 기다립니다.
(3분)

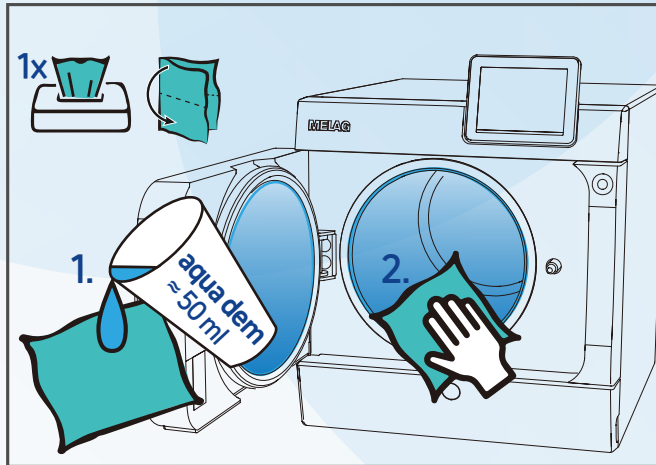

5. 깨끗한 정수물로 표면을 닦습니다.

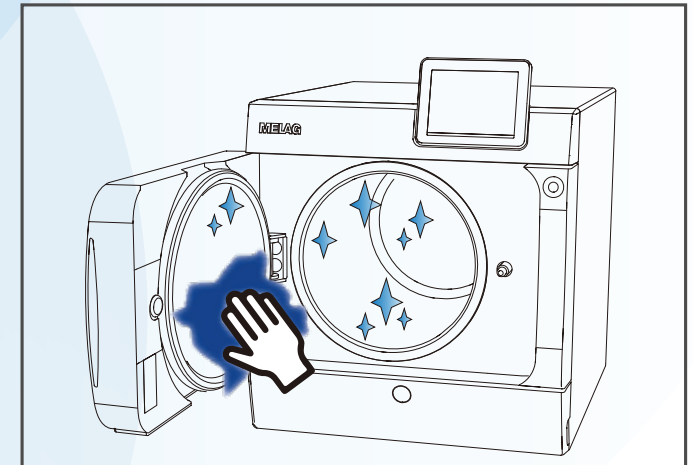

6. 물기가 건조되면 보풀이 없는 마른 천으로 닦습니다.

- 주의 사항 : 1) 손을 보호하기 위해 사용 전 글러브를 착용하세요.
2) 눈에 들어가지 않도록 주의하세요.
3) 직사광선을 피하고 상온에 보관하세요.

- 챔버 내의 Stain 제거를 위해 수세미를 사용하지 마세요.
표면에 손상을 일으킬 수 있습니다.