

MD550 Spittoon bowl cleaner

사용 방법

원액을 브러쉬를 이용해 타구대에 바르고, 2분후 물로 헹굼

제품 적용

타구대 세척
(환자 진료가 모두 끝난 저녁에 각 চে어에 시행)

제품 특징

- 석회층, 혈액, 플라크, 변색 오염원을 제거
- 타구대 세척, 탈취, 케어를 한번에, 항균 효과
- 연마제 미포함, 타구대 굴힘과 잔류물 형성 방지
- Foam-free, 자연분해되어 환경과 인체에 안전

주요 성분 : 알코올

용량 : 750ml (₩ 24,600)

살균 효과

세균¹⁾, TB균²⁾, 곰팡이균³⁾

1) Testing at low burden(EN 13727, EN 13624, EN 14348)

타구대 라인 세척관리(체어 4대 기준)

1. Orocup에 물 1L, MD555 50ml를 희석한다.
2. 희석액을 250ml씩 타구대에 붓는다.
3. 30분~최대 2시간 대기한다.
4. Orocup에 물1L를 채워 각 타구대를 헹군다.



MD520 Impression disinfection

사용 방법

원액에 기구 전체가 잠기도록 침지

제품 적용

인상체, 인상 트레이, 브릿지 & 크라운 등의 보철물, 틀니, 치열 교정기 등의 세척, 소독

제품 특징

- 치과용 인상체를 변형없이 안정적으로 세척, 소독 (알지네이트, 실리콘, 폴리메테르라버 등)
- 뛰어난 세척작용으로 모형의 정밀도 향상
- 자연분해되어 환경과 인체에 안전

주요 성분 : 4기암모늄화합물

용량 : 2.5L (₩ 63,500)

적용

표면소독(VAH에 따라)

세균¹⁾ 곰팡이균²⁾

Tb균³⁾

B형, C형 간염, HIV 포함

Vaccinia Viruses^{3), 4)}

Adenoviruses^{1), 3)}

SV40 polyomaviruses³⁾

Noroviruses^{1), 3)}

Polioviruses^{1), 3)}

1) Testing at high burden(VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476)

2) Testing at low burden(EN 14348, EN 14563)

3) Testing with and without burden in accordance with DVV/RKI guidelines

4) In accordance with RKI statement (Federal Health Bulletin 60, 353-363, 2017)



DÜRR Dental Hygiene System 하나로 치과 내 모든 감염관리를 한번에 해결하세요.

눈금이 표시된 뚜껑으로 계량



뚜껑 한컵 40ml 반컵 20ml

Safe

· 유럽스탠다드 기준 통과, 유럽 인증, EN 기준 승인, 독일 VAH 리스트, RKI 등재

Gentle

· 장비와 피부에 안전, 세계 유명 유닛체어 & 치과장비 매뉴얼에 추천, 환경 친화적


Convenient

· 컬러 구분으로 사용의 편의성, 눈금이 표시된 뚜껑으로 정확한 계량

Fast

· 매우 빠른 반응시간, 강력한 오염 제거, 광범위한 소독력, 부식 & 기구 손상 방지

* VAH(독일음용위생협회) : 독일보건마생협회(DGHM)에서 엄격한 유럽 표준시험방법에 따라 테스트하고 효능이 입증된 제품만 인증하고 등재
* RKI(질병관리본부) : 독일 치과감염관리 가이드라인에 등재

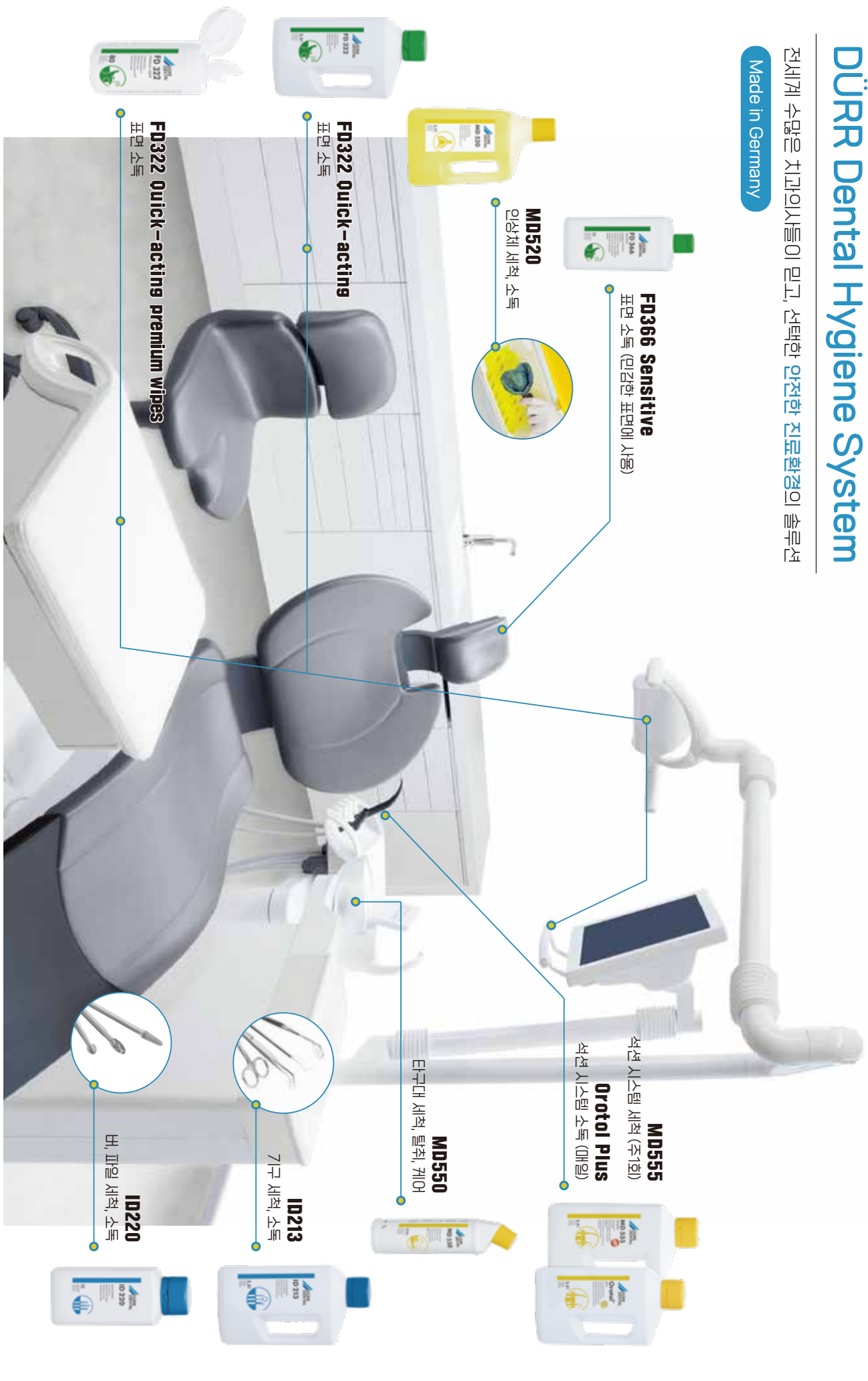

Made in Germany

전 제품 유럽 스탠다드 기준 통과 유럽이 인증한 DÜRR Dental Hygiene System

전세계 수많은 치과의사들이 믿고, 선택한 안전한 진료환경의 솔루션



DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

표면 소독

기구 세척 · 소독

특수구역 소독

Since 1965 더욱 효율적이고, 완벽한 감염관리를 위한

DÜRR Dental Hygiene System

FD322 Quick-acting premium wipes disinfection



[본품]

[리필]

사용 방법

티슈를 뽑아 장비나 기기의 표면을 닦아낸다.

제품 적용

환경 표면, 의료기기의 표면을 빠르게 소독

제품 특징

- 우수한 재료 호환성 · 얼룩없는 빠른 건조
- 자연분해되어 환경과 인체에 안전
- 알코올에 의한 표면 손상 주의(아크릴 등)

주요 성분 : 알코올

용량 : 80매 (₩ 14,700 / 리필 ₩ 10,500)

적용	시간
표면소독(VAH에 따라)	1분
세균 ¹⁾ 곰팡이균 ¹⁾	1분
Tb균 ¹⁾	1분
Moulds ¹⁾	15분
B형, C형 간염, HIV 포함 Vaccinia Viruses ^{2) 3)}	30초
Adenoviruses ¹⁾	30초
SV40 polyomaviruses ²⁾	5분
Noroviruses ¹⁾	30초

1) Testing at low and high burden(VAH, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348, EN 16615, EN 14476)
2) Testing with and without burden in accordance with DVV/RKI guidelines
3) In accordance with RKI statement (Federal Health Bulletin 60, 353 - 363, 2017)

ID213 Instrument disinfection



사용 방법

희석액에 기구 전체가 잠기도록 침지(최대 12시간)

제품 적용

일반기구, 수술기구의 세척 및 소독

제품 특징

- 강력한 세척, 광범위한 살균, 부식방지 효과
- 자연분해되어 환경과 인체에 안전
- 세척 후 소독제로 사용 시 : 14일 사용
- 기구 세척제로 사용 시 : 매일 교체

주요 성분 : 알칼리안, 47암모늄화합물

희석 비율 : 2% (물 1L ID213 20mL)

용량 : 2.5L (₩ 82,600)

적용	희석 비율	시간
표면소독(VAH에 따라)	2%	5분
세균 ¹⁾ 곰팡이균 ¹⁾	2%	5분
세균 ¹⁾ 곰팡이균 ¹⁾ 초음파세척기 사용시	2%	2분
Tb균 ¹⁾	2%	60분
Tb균 ¹⁾ 초음파세척기 사용시	2%	30분
B형, C형 간염, HIV 포함 Vaccinia Viruses ^{2) 3)}	2%	1분
SV40 polyomaviruses ²⁾	2%	15분
Noroviruses ¹⁾	2%	60분

1) Testing at high burden(VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563)
2) Testing with and without burden in accordance with DVV/RKI guidelines
3) In accordance with RKI statement (Federal Health Bulletin 60, 353-363, 2017)
4) Testing at high burden (EN 14476)

Orotol Plus Disinfection of suction system



사용 방법 (체어 2대 기준)

희석액 2L 준비, 1L 씩 석션 후 8시간 대기, 물 1L 씩 석션하여 헹굼

매일 사용

제품 적용

석션 시스템의 소독, MD555와 함께 사용 추천

제품 특징

- 세계최초의 석션소독제(유니테어 제조사 추천)
- Bio-film을 분해, 퇴적된 침전물(표, 단백질) 제거, 흡입력 개선, Foam-free
- 세척, 소독, 탈취를 한번에 해결, 자연분해

주요 성분 : 47암모늄화합물

희석 비율 : 2% (물 1L Orotol 20mL) 용량 : 2.5L (₩ 89,300)

적용	희석 비율	시간
석션시스템 소독	2%	5분
세균 ¹⁾ 곰팡이균 ¹⁾	2%	5분
B형, C형 간염, HIV 포함	2%	30분
Enveloped viruses ^{2) 3)}		
Adenoviruses ⁴⁾	2%	30분
Noroviruses ¹⁾	2%	30분

1) Testing at high burden(VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476)
2) Testing with and without burden in accordance with DVV/RKI guidelines
3) In accordance with RKI statement (Federal Health Bulletin 60, 353-363, 2017)
4) Testing at low burden, High burden : 2%/2 h, 4%/15 min

FD322 Quick-acting disinfection



사용 방법

원액을 티슈나 타월에 충분히 적셔 장비나 기기의 표면을 닦아낸다.

제품 적용

환경 표면, 의료기기의 표면을 빠르게 소독

제품 특징

- 우수한 재료 호환성, 얼룩없는 빠른 건조
- 자연분해되어 환경과 인체에 안전

주요 성분 : 알코올

용량 : 1L (₩ 26,300) 2.5L (₩ 59,200)

적용	시간
표면소독(VAH에 따라)	1분
세균 ¹⁾ 곰팡이균 ¹⁾	1분
Tb균 ¹⁾	1분
Moulds ¹⁾	15분
B형, C형 간염, HIV 포함 Vaccinia Viruses ^{2) 3)}	30초
Adenoviruses ¹⁾	30초
SV40 polyomaviruses ²⁾	5분
Noroviruses ¹⁾	30초

1) Testing at low and high burden(VAH, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348, EN 16615, EN 14476)
2) Testing with and without burden in accordance with DVV/RKI guidelines
3) In accordance with RKI statement (Federal Health Bulletin 60, 353 - 363, 2017)

ID220 Bur disinfection



사용 방법

원액에 기구 전체가 잠기도록 침지(최대 12시간)

제품 적용

Bur, File, Cutter, Grinder 등을 세척, 소독

제품 특징

- 회전식 기구의 강력한 세척, 소독, 부식방지 효과
- 광범위한 살균, 매우 빠른 반응 시간
- 자연분해되어 환경과 인체에 안전
- 유기물이 없을 시 : 7일 사용
- 유기물이 보일 시 : 즉시 교체

주요 성분 : 알칼리성 알코올

용량 : 1L (₩ 24,400)

적용	시간
표면소독(VAH에 따라)	1분
세균 ¹⁾ TB균 ¹⁾ 진균 ¹⁾	1분
세균 ¹⁾ TB균 ¹⁾ 진균 ¹⁾ 초음파세척기 사용시	30초
B형, C형 간염, HIV 포함 Vaccinia Viruses ^{2) 3)}	15초
Adenoviruses ^{1) 2)}	1분
SV40 polyomaviruses ²⁾	30초
Noroviruses ^{1) 2)}	1분
Polioviruses ^{1) 2)}	1분

1) Testing at high burden(VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563)
2) Testing with and without burden in accordance with DVV/RKI guidelines
3) In accordance with RKI statement (Federal Health Bulletin 60, 353-363, 2017)

MD555 Special cleaner for suction system



사용 방법 (체어 2대 기준)

희석액 2L 준비, 1L 씩 석션 후 30분~최대 2시간 대기, 물 1L 씩 석션하여 헹굼

주1회 사용

제품 적용

석션 시스템의 세척, Orotol과 함께 사용 추천

제품 특징

- 강력한 세척력, 침전물 완벽 제거
- 퇴적된 파우더를 완전히 용해
- 탈취 효과, 흡입력 개선(유니테어 제조사 추천)
- Foam-free, 자연분해

주요 성분 : 유기산, 인산

희석 비율 : 5% (물 1L MD555 50mL) 용량 : 2.5L (₩ 59,000)



FD366 Disinfection of sensitive surfaces



사용 방법

원액을 티슈나 타월에 충분히 적셔 장비나 기기의 표면을 닦아낸다.

제품 적용

환경 표면, 의료기기의 표면을 소독

제품 특징

- 우수한 재료 호환성, 민감한 표면에 특히 적합
- 자연분해되어 환경과 인체에 안전
- 표면 손상 없음

주요 성분 : 알코올, 47암모늄화합물

용량 : 1L (₩ 26,500)

적용	시간
표면소독(VAH에 따라)	1분
세균 ¹⁾ 곰팡이균 ¹⁾	1분
Tb균 ¹⁾	2분
B형, C형 간염, HIV 포함 Vaccinia Viruses ^{2) 3)}	30초
Noroviruses ⁴⁾	5분

1) Testing at low and high burden (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615)
2) Testing with and without burden in accordance with DVV/RKI guidelines
3) In accordance with RKI statement (Federal Health Bulletin 60, 353 - 363, 2017)
4) Testing at low burden (EN 14476)

Hygobox



[색상]



제품 적용

침지 용기

제품 특징

- 인체공학적 디자인
- 내부 추가 버킷으로 편리한 사용

사이즈(HxWxD) : 13x32.5x21cm

용량 : 3L (₩ 99,100)



내부 추가 버킷

OroCup Care system



사용 방법

물 2L에 Orotol 또는 MD555를 희석하여 소구경/대구경 석션을 크기에 맞는 Adapter에 체결하여 석션

제품 적용

Orotol plus, MD555

제품 특징

- 석션시스템의 세척, 소독 전용물
- 공기와 물의 혼합을 도와 석션내부에 세척, 소독제를 적절히 도포
- 모든 석션호스 규격에 사용 가능

용량 : 2L (₩ 75,000)



뚜껑을 열어 사이즈 확인